

機械器具 12 理学診療用器具

一般医療機器 体表面用超音波プローブカバー JMDN 70014000

エコーカバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止
体内及び、粘膜・創傷面には使用禁止

【形状】

滅菌済み体表面用筒状カバー



【原材料】

ポリエチレン、ポリプロピレン、ウレタン、塩化ビニル、天然ゴム及び合成ゴムなどのフィルム又はチューブを原料とする

【使用目的】

体表面で使用する場合に於いて、超音波プローブに本品を装着することで、体液または汚れからの保護をする。本品は単回使用である。

【使用方法】

- ①本品を滅菌バックより取り出します。
- ②本品の側面開口部よりデバイスを挿入します。
- ③本品先端まで設置が完了したら、特殊タタミを展開しデバイスのコードまでを覆います。
- ④必要に応じ、輪ゴム等で先端のデバイスを固定します。
- ⑤使用後は再使用せず廃棄します。

【使用上の注意】

- 再滅菌しないこと
- 包装が破損又は汚損、水濡れしている場合は、使用しないこと
- 本品はアレルギー症状を起こすことがあります。アレルギー症状が起きた場合は、使用を中止し医師と相談して下さい。
- 本品は体表面用のカバーになります。体内及び粘膜・創傷面には使用しないで下さい。

【貯蔵方法】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること
小児の手の届かないところに保管すること

【使用期限】

滅菌袋及び外装パッケージラベルに記載。
製造日より3年。

【包装】

単位：枚・セット / 内容量：パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
株式会社ハイルパーティ

〒503-0856 岐阜県大垣市新田町 4-45
TEL : 0584-87-1020