

N95 使い捨て式防じんマスク



Particulate Respirator



米国 NIOSH 微粒子防護マスク クラス N95 認定

- 空気感染予防（新型インフルエンザ・SARS・結核菌など）対策に推奨されるマスクです。
- 立体形成に優れるカップ型のN95マスクです。廃棄弁付仕様あり。
- 空間調整用のノーズピースによりフィット性を高め、空気漏れを防ぎます。

● MK910-N95DS2

● MK910-N95DS2V（排気弁付）




■ 基本性能

	MK910-N95DS2 (V)	NIOSH 規格値
粒子捕集効率 (NaCl)	95.0%以上	95%以上
吸気抵抗値	50PA 以下	343PA 以下
排気抵抗値	50PA 以下	245PA 以下
梱包単位	20 枚 / 箱	-

この製品は、疾患または感染のリスクを皆無にするものではありません。マスクが血液、体液で汚染された場合、直ちに交換して下さい。不適切な着用、誤った取り扱いをした場合健康に害を及ぼす恐れがございます。



■ 装着手順

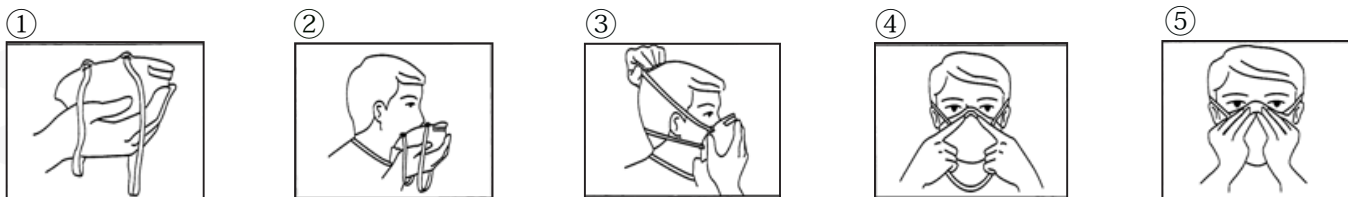

① 図のように鼻あてが前に来るようにマスクを包むように当てるように持ちます。

② マスクでアゴを包むように当てるように持ちます。

③ 片手でマスクを押さえながら下のゴムを首のまわりにつけ、次に上のゴムを頭上後頭部につけてください

④ 両手の指で鼻あてが鼻に密着するように軽く押しします。

⑤ 両手でマスク全体をおおい、息を吐き空気のもれをチェックして密着のいい場所にマスクをあわせませす

商品名	商品番号	規格	入数	定価
使い捨て式防じんマスク	MK910-N95DS2	FREE	20 枚 / 箱 × 12	オープン価格
	MK910-N95DS2V	FREE 廃棄弁付	10 枚 / 箱 × 12	

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS
HEIL-BART
ハイルバート

【本社営業部】
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町4丁目45番地
TEL: 0584 (87) 1020
【東京支店】
〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-5 第二KSビル4F
TEL: 03 (3813) 2463