



Cアームカバー (両面テープ)

C-ARM COVER

- ・ X線画像診断装置 (Cアーム等) を汚染の恐れのある液体等から清潔に保つポリプロピレン製カバー
- ・ 弱粘性の両面テープになりますので取り外し等容易に行うことが可能です。
- ・ 特殊タタミになりますので装着時の清潔野を確保した設置・取り外しが可能です。


Cアームカバー (両面テープタイプ)

●イメージカバー (管球用)
※別売り

●Cアームカバー

※別売り

■Cアーム部詳細

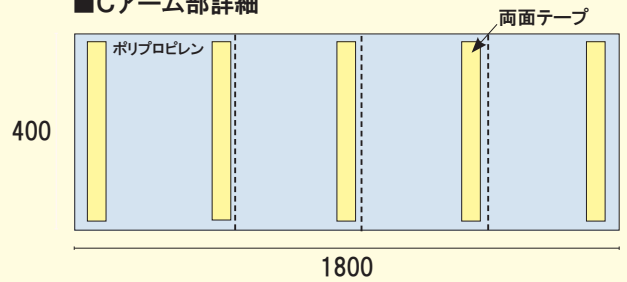

■装着方法

- ①メッキンバッグ開封後、上部より順にCアームカバーを設置します。
- ②固定用両面テープをはがし器械本体に貼付けします。
(段階的に切れやすいテープで仮止めをしておりますので清潔野の確保が容易になりました。)
- ③別売りの管球用イメージカバーをそれぞれセットします。
(状況により添付の両面テープにて固定します)

上記製品は、カスタマイズが可能な製品になります。

構成品の変更・別注品の依頼は弊社営業担当もしくは販売代理店までご相談ください。

商品名	商品番号	サイズ・規格	入数	定価	滅菌	JAN
Cアームカバー (両面テープタイプ)	PP-CARM-A	400mm × 1700 mm	50 枚 / 箱 × 2	1000 円 / 枚	○	4580113479352
	PP-CARM-B	400mm × 1800 mm		1000 円 / 枚		4580113478744
	PP-CARM-C	400mm × 1900 mm		1100 円 / 枚		4580113479369
	PP-CARM-D	400mm × 2000 mm	30 枚 / 箱 × 2	1200 円 / 枚		4580113479376
	PP-CARM-E	400mm × 2100 mm		1300 円 / 枚		4580113479802

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS

HEIL-BAR-T
ハイルバート