



TUR用パウチ (URO 用受水パウチ) Urological Disposable Pouch

- ・感染管理に有用な使い捨てタイプの**ウロ処置用**受水パウチになります。
- ・本体フィルム厚を厚めに調整しました強度に富んだ仕様になります。処置時の軽微なズレにも形状保持します
- ・採集用網が本体底面に加工されていますので、処置時の検体採集が容易に行えます。
- ・廃液用ホース付（先端コネクタ添付も可能）ですので、滞留せず廃液のルート確保可能です。

固定用紐 or オイフテープ等で手術台に設置可能

固定用紐（左右2本）

採集用網

廃液ホース

【使用方法】

- ①製品本体を滅菌パックより取り出し一時展開します。
- ②製品本体の患者様（処置台）側を先に設置します。（適宜固定をします。）
- ③ドクター側にある紐をドクターの両肩に各々クリップ等で固定し立体を形成します。
- ④廃液ホースを固定したら展開完了です。

◆ P-TUR-01A 図面



分類：雑品

商品名	商品番号	規格 (mm)	入数	定価	JAN コード
TUR 用パウチ (EOG 滅菌済み)	P-TUR-01A	FREE 廃液ホース 150cm 滅菌済	15 枚 / 箱 × 2	オープン価格	4580113476252

※他サイズ等ご要望の際は弊社営業担当もしくは販売代理店までお問い合わせください

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS
HEIL-BAR-T
ハイバルバート

◆営業本部

〒503-0856 岐阜県大垣市新田町 4-45 番地
TEL 0584-87-1020 FAX 0584-87-1029

◆東日本営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-5 スリーワンビル 802
TEL 045-534-6809 FAX 045-534-6819